

## Anleitung zur Probenentnahme Cytobrush

Videoanleitungen und Tipps finden Sie auf unserer Website:

[www.feragen.at/probenentnahme](http://www.feragen.at/probenentnahme)



idealerweise  
morgens



2h kein Zugang  
zu Futter



1h vorher  
kein Leckerli





2h vorher keine  
Muttermilch

## PROBENTNAHME

Die Verpackung aufbewahren, sie ist **wichtig** für die Rücksendung!

Bitte senden Sie **alle** beigelegten Bürstchen zurück!

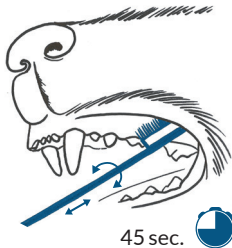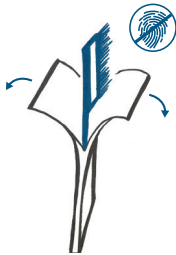

45 sec.



**Achtung:** Die Bürstchen dürfen **ausschließlich** die **Mundschleimhaut** des Hundes berühren.

Jedes Bürstchen **nur** zwischen **oberer** Lefze und Kiefer **mind. 45 Sekunden drehend** vor und zurück ziehen.

Alle Bürstchen ca. **1h in einem Glas vollständig trocken** lassen. Danach in die Verpackung zurückschieben.

Bitte beschriften Sie die Bürstchen eindeutig!  
(z.B. mit der Chipnummer)

Noch Fragen? Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter!

AT +43 662 43 93 83  
DE +49 8654 / 68 24 430

[support@feragen.at](mailto:support@feragen.at)