

Anleitung zur Probenentnahme Genotube

Videoanleitungen und Tipps finden Sie auf unserer Website:
www.feragen.at/probenentnahme



idealerweise
morgens



2h kein Zugang
zu Futter



1h vorher
kein Leckerli



2h vorher keine
Muttermilch

PROBENTNAHME

Bitte senden Sie **alle** beigelegten Bürstchen zurück!



Achtung: Das Bürstchen darf **ausschließlich** nur die **Mundschleimhaut** des Hundes berühren.



Das Bürstchen **nur** zwischen **oberer Lefze und Kiefer** mind. **45 Sekunden** **drehend** vor und zurück ziehen.



Danach in die Verpackung zurückschieben. **Ein Trocknen des Bürstchens ist nicht mehr nötig!**

Noch Fragen? Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne weiter!

AT +43 662 43 93 83
DE +49 8654 / 68 24 430

support@feragen.at