

Anleitung Probenentnahme FTA Karte

1



Beschriftung der Karte mit Testkit ID (Siehe Rechnung) und Name des Tieres

2



Pipette, Kapillare oder Blutröhrchen ein paar Millimeter über den markierten Kreis halten – nicht mit der Pipetten- bzw. Kapillarspitze auf die Karte drücken. Probenvolumen gleichmäßig als Tropfen auf den Kreis auftragen. So dass der Kreis ausgefüllt ist.


3

 1–3 Stunden



Nach Auftrag die Karte vollständig lufttrocknen lassen (z. B. 1 – 3 Stunden, je nach Feuchtigkeit) – entscheidend für Stabilität und Vermeidung von Probentransfer/Kontamination.

4

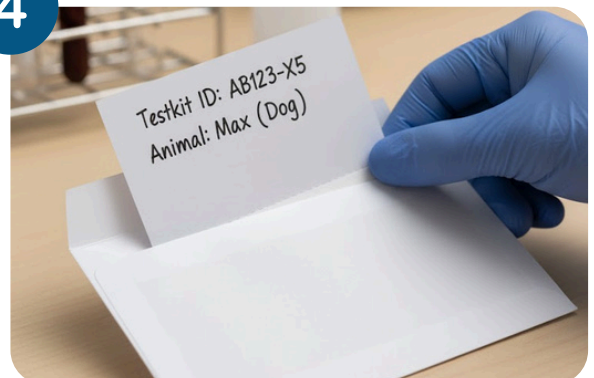

Nach dem Trocknen: Karten in Umschlag und Versand bei Raumtemperatur möglich.

Fragen? Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter!

AT +43 662 43 93 83
DE +49 8654/68 24 430

support@feragen.at