

Anleitung zur Probenentnahme

Videoanleitungen und Tipps finden Sie auf unserer Website:
www.feragen.at/probenentnahme



ZU BEACHTEN



Idealerweise
am Morgen



2h vorher
KEIN Futter



2h vorher
KEINE Leckerli




Bei Welpen 2h vorher
KEINE Muttermilch

PROBENTNAHME


Die Verpackung aufbewahren, sie ist **wichtig** für die Rücksendung!



Achtung: die 2
Bürstchen dürfen
ausschließlich die
Mundschleim-
haut des Hundes
berühren.

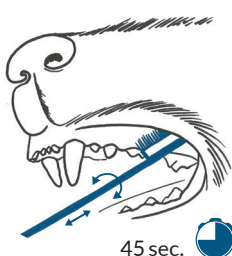

Jedes Bürstchen
nur zwischen **obe-
rer Lefze und Kiefer**
mind. **45 Sekunden**
drehend vor und
zurück ziehen.

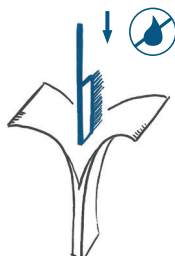

Alle 2 Bürstchen ca.
1h in einem Glas
vollständig trock-
nen lassen. Danach
in die Verpackung
zurückschieben.

Verwechslungsgefahr: bei mehreren Tieren achten Sie darauf, dass alle
Proben in den richtigen Originalverpackungen retourniert werden.

Sie haben noch Fragen?

support@feragen.at

+43 662 / 43 93 83

+49 157 / 391 81 060