

## Anleitung Probenentnahme Kotprobe



Benutzen Sie den Entnahmelöffel aus dem Probenröhrchen, um eine erdnussgroße Menge Kot zu entnehmen. Das Probenröhrchen darf nicht überfüllt werden.



Achten Sie darauf, dass Sie mit der entnommenen Probe nicht die Außenseite des Probenröhrchens berühren.



Das Probenröhrchen fest mit dem Deckel verschließen.



Das fest verschlossene Probenröhrchen in den Schutzbeutel geben.



Geben Sie den Schutzbeutel mit den ausgefüllten Daten in den Rückversandumschlag.



Die Probe am Tag der Entnahme verschicken. Die Probe muss nicht gekühlt versendet werden.



Sie erhalten Ihr Ergebnis per E-Mail.

## Versandadressen

### Österreich

FERAGEN GmbH  
Strubergasse 26  
5020 Salzburg

### Deutschland

KUBEOS GmbH  
c/o FERAGEN  
Niedervillern 8  
83410 Laufen



Füllen Sie die Daten vollständig aus und legen sie den Abschnitt mit in den Rückumschlag.

## Kit ID:



Name:



Name:



Email:



Phone:

